

SNELLE, MAKKELIJKE ÉN BETROUWBARE ZELFTEST

Inhoud van deze test:

1 aluminium zakje met testcassette:
"IMP hCG TEST"



1 bijsluiter



Imhotep Medical Products

Postbus 162

6590 AD GENNEP

NEDERLAND

www.easyhometest.eu

Heeft u vragen? Bel onze servicelijn: 0485 519931

Zodra de test is uitgevoerd, kan men alle gebruikte spullen
weer terugdoen in de lege folieverpakking en vervolgens in
het originele doosje. Daarna wegdoen bij het huisafval.

Bijsluiterversie: 17 oktober 2006



ZWANGERSCHAP BIJSLUITER

Belangrijk

Lees voor gebruik van de Easy Home Test
deze bijsluiter goed door.

WAARVOOR GEBRUIKT U DE TEST?

De Easy Home Test Zwangerschap is een zelftest voor het aantonen van het zwangerschapshormoon hCG (humaan Chorion Gonadotrofine) in urine. Een verhoging van het zwangerschapshormoon kan betekenen dat er een zwangerschap plaatsvindt. Al na 5 minuten kan de test worden afgelezen. De Easy Home Test Zwangerschap is alleen geschikt voor in vitro gebruik.

ZWANGERSCHAP IN HET KORT

Vanaf het begin van een zwangerschap, maakt het lichaam het zwangerschapshormoon (hCG humaan Chorion Gonadotrofine) aan.

De hoeveelheid van dit hormoon neemt toe in bloed en urine tijdens de zwangerschap.

De Easy Home Test Zwangerschap toont de aan- of afwezigheid van het zwangerschapshormoon aan in urine.

HOE WERKT DE TEST?

Wanneer een vrouw zwanger is, stijgt de hormoon concentratie in bloed en urine. De Easy Home Test Zwangerschap bevat antilichamen die met dit hormoon, aanwezig in de urine, zal reageren. Deze reactie geeft een gekleurde uitslaglijn op de teststrip.

Na het aanbrengen van de urine op de teststrip zal in het venster van het testplaatje één (controle lijn) of twee gekleurde lijnen (controle lijn én uitslaglijn) ontstaan. Twee lijnen betekent dat er een toename van het zwangerschapshormoon is en geeft aan dat er een zwangerschap plaatsvindt.

De controlelijn geeft aan dat de test goed is uitgevoerd.

INHOUD.

- 1 aluminium zakje met opschrift “IMP hCG Test” met daarin een teststrip en een zakje met vochtabsorberend middel, dat verder niet nodig is voor het uitvoeren van de test.

- 1 bijsluiter

Extra nodig voor de test:

- een klok, wekker of stopwatch om de tijd op te nemen

BELANGRIJK

- Lees voor gebruik van de test deze gebruiksaanwijzing goed door.

- Niet voor inwendig gebruik. Vermijd tijdens het nemen van het urinemonster en uitvoeren van de test contact tussen handen en ogen of neus. Niet eten, drinken of roken in de nabijheid van de test.

- Deze test is voor eenmalig gebruik. Daarom is het erg belangrijk om alle instructies goed te lezen zodat het duidelijk is wat er gedaan moet worden, voordat de test wordt uitgevoerd. Voer alle instructies nauwkeurig uit – het niet goed opvolgen kan leiden tot een verkeerde uitslag.

- De test mag niet gebruikt worden na de op de verpakking aangegeven vervaldatum of wanneer de verpakking beschadigd of geopend is. Breng de beschadigde test terug naar de winkel waar deze gekocht is.

BEWAREN VAN DE TEST

- Bewaar de test bij kamertemperatuur (4 - 30 °C), buiten bereik van kinderen.

- Bescherm tegen zonlicht, vochtigheid en hitte.

- Niet invriezen.

- Open het aluminium zakje vlak voor het gebruik van de test.

- Als de test klaar is, doe dan alle gebruikte spullen weer terug in de lege folieverpakking en vervolgens in het originele doosje. Daarna het doosje bij het huisafval gooien.

WANNEER DE TEST UITVOEREN

De Easy Home Test Zwangerschap kan uitgevoerd worden met elk urinemonster.


Ochtendurine zal echter de duidelijkste resultaat opleveren omdat, indien men zwanger is, hierin de hoogste concentratie zwangerschapshormoon aanwezig zal zijn.

UITVOERING VAN DE TEST

STAP 1


Open het aluminium zakje met opschrift “IMP hCG Test” net voor het uitvoeren van de test en haal de test uit het zakje.

Opgelet: de vorm van de test strip op de afbeeldingen hieronder is licht verschillend van de Easy Home Test Zwangerschap teststrip in het zakje.

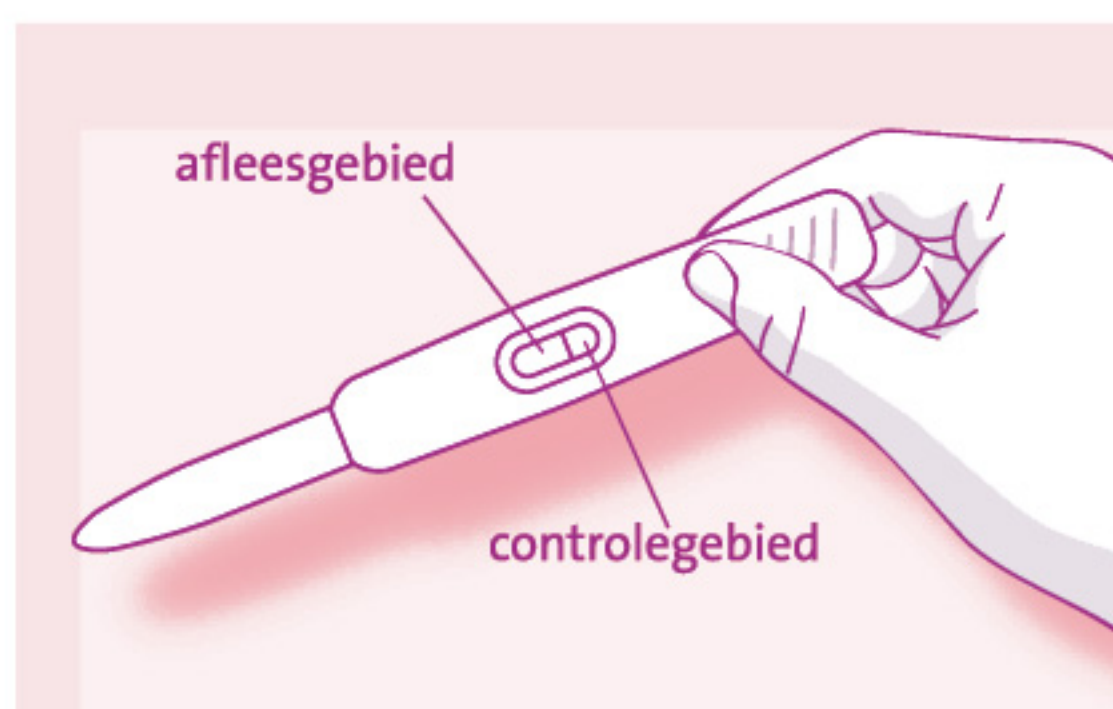

STAP 2

Neem de teststrip zo vast dat het afleesgebied zichtbaar is. Verwijder de dop van de teststrip.

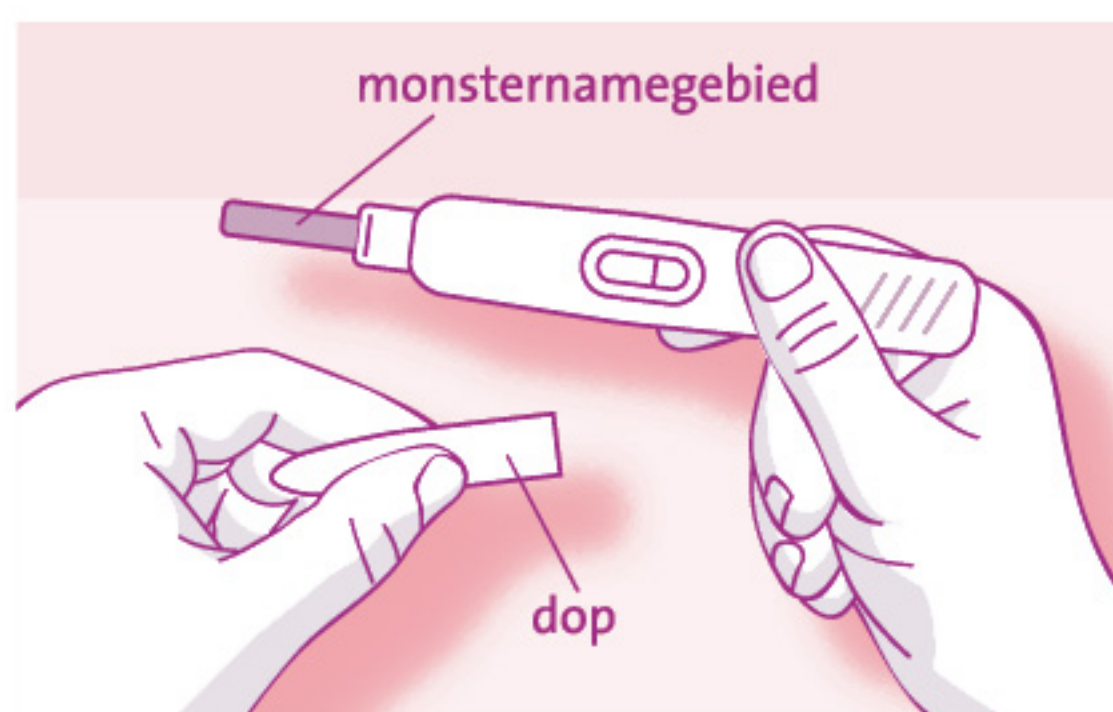

STAP 3

Houd het monsteropnamegebied minstens 10 seconden in de urinestraal, met andere woorden, plas over het monster opnamegebied.

Let op dat de urinestraal niet voorbij de pijl op de teststrip vloeit.




STAP 4

Haal de teststrip uit de urinestraal en houd de teststrip gedurende 10 tot 15 seconden omlaag, zodat de overtollige urine eraf loopt. Houd de teststrip met het monsternamegebied niet omhoog voordat je de test hebt afgelezen.



STAP 5

Plaats de dop weer terug op de teststrip en leg de teststrip op een vlakke ondergrond met het afleesgebied naar boven.

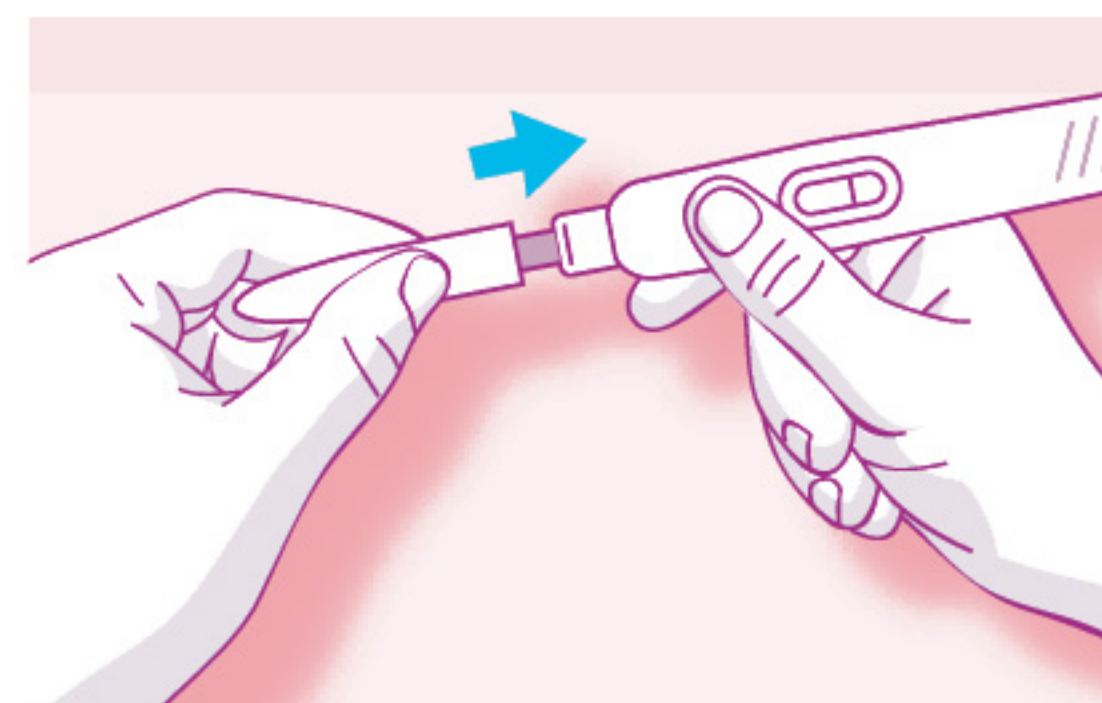


STAP 6

Lees na 5 minuten het resultaat af. Wacht niet langer dan 5 minuten, dan bestaat de kans dat er een foutief resultaat afgelezen wordt.

AFLEZEN VAN HET RESULTAAT

Tijdens de 5 minuten wachttijd zal er een zwakke, een sterke of geen testlijn zichtbaar worden.

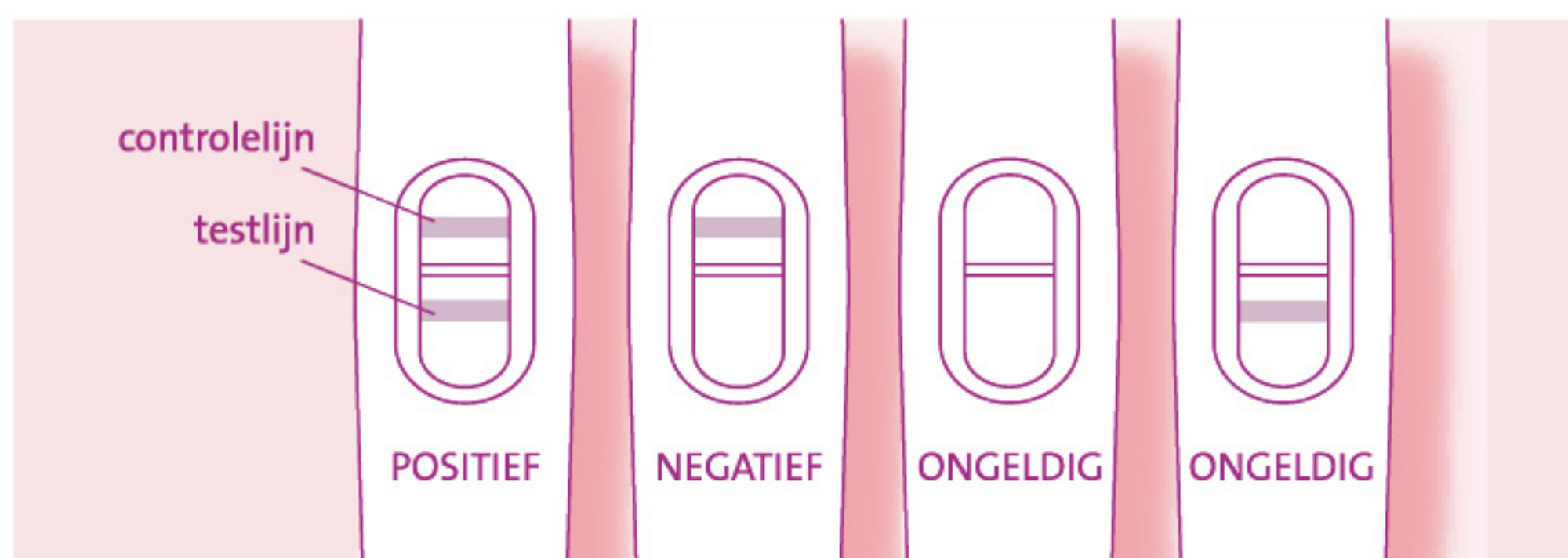

Negatieve uitslag:

Als alleen de controle lijn zichtbaar is dan is de uitslag negatief – er is geen zwangerschap.

Als er anderen redenen zijn om aan te nemen dat er een zwangerschap is (bv uitblijven van de menstruatie), kan de test na enkele dagen herhaalt worden met een nieuwe test. Blijft het resultaat negatief ga dan naar de huisarts.

Positieve uitslag:

Als er twee lijnen gekleurd zijn, de testlijn en de controle lijn, is de uitslag positief: er is een kans dat er een zwangerschap plaatsvindt. De kleurintensiteit van de uitslaglijn kan verschillen, omdat de concentratie in de verschillende fases van de zwangerschap verschillend is.

Als er slechts een hele zwakke testlijn zichtbaar is, is het aan te raden om na 48 uur een nieuwe test uit te voeren.

Als de test positief is, ga dan naar de huisarts.

Ongeldig resultaat:

Er zijn helemaal geen lijnen of alleen de testlijn is zichtbaar. De test is dan niet goed uitgevoerd. De lijnen moeten na 5 minuten zichtbaar zijn.

Herhaal de test nog een keer. Gebruik hiervoor een nieuwe test.

Als de test herhaaldelijk ongeldig is bel dan de servicelijn: 0485-519931.

WAARSCHUWINGEN

- Bevestiging van de zwangerschap kan enkel gebeuren door een dokter. Hij zal dit doen aan de hand van alle klinische resultaten en waarnemingen.

- Een verdund urinemonster kan een foutieve negatieve uitslag geven. Als een zwangerschap verwacht wordt, herhaal dan de test na 48 uur met een nieuwe test.

- In een hele vroege fase van de zwangerschap kan de concentratie zwangerschaphormoon nog te laag zijn om te meten. Als een zwangerschap wordt verwacht, herhaal de test na 48 uur met een nieuwe test.

-Verhoogde concentraties zwangerschaphormoon kunnen ook veroorzaakt worden door andere factoren. Het is daarom belangrijk om een zwangerschap te laten bevestigen door een dokter.

- Op basis van de concentratie zwangerschaphormoon kan geen onderscheid gemaakt worden tussen een normale en een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Een miskraam kan ook een afwijkende uitslag geven.

- Hormoonbehandelingen op basis van hCG kunnen foutieve resultaten geven. Raadpleeg de huisarts.

Vragen? Bel de servicelijn: 0485 519931.

VERWACHTE RESULTATEN

De Easy Home Test Zwangerschap is een gevoelige test die een zwangerschap kan vaststellen de eerste dag na het uitblijven van de menstruatie.

Bij gezonde mannen en niet-zwangere vrouwen zal de test negatief zijn.

De concentratie zwangerschapshormoon in de vroege fases van de zwangerschap kunnen sterk variëren.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vraag:

De kleursterkte van de controle lijn verschilt fel tussen twee testen. Maakt dit iets uit?

Antwoord:

Nee. Verschillen in de kleur van de controlelijn hebben geen invloed op de uitslag van de test.

Vraag:

Mag het resultaat van de test nog afgelezen worden na meer dan 5 minuten?

Antwoord:

Nee. Het resultaat moet afgelezen worden na 5 minuten en niet later.

Een positief resultaat zal niet veranderen na enkele dagen, een negatief resultaat kan veranderen in een vals positief resultaat enkele minuten nadat de test afgelezen moet zijn.

Het is dus het beste om het resultaat af te lezen na 5 minuten en dan de teststrip weg te gooien om verwarring te voorkomen.

Vraag:

In het afleesvenster is een roze achtergrondkleuring en verticale strepen zichtbaar. Maakt dit iets uit?

Antwoord:

Nee. Deze kleuringen worden veroorzaakt door o.a. de vochtigheid van de lucht en de unieke chemische samenstelling van het urinemonster. De uitslag wordt hierdoor niet beïnvloed.

Zolang de controlelijn zichtbaar is na 5 minuten, is de test correct uitgevoerd en kan de uitslag worden afgelezen.

Verklaring van de gebruikte symbolen op de verpakking:



LEES DE BIJSLUITER
VOOR GEBRUIK



NIET GESCHIKT
VOOR HERGEBRUIK



VERVALDATUM



LOT NUMMER



BEWAARTEMPERATUUR



FABRIKANT



IN VITRO
DIAGNOSTICUM