



## Informatie voor de gebruiker

**Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het product gaat gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Misschien heeft u hem later weer nodig. Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw huisarts of apotheker.**

### Wat is een zere keel?

Een zere keel is een symptoom van een ziekte van de keel. Een zere keel is meestal het gevolg van een infectie met verkoudheid- en griepvirussen. Kenmerkende symptomen van een zere keel zijn keelpijn, moeite met slikken, een rode keel en opgezwollen amandelen.

### Wat is behandel- en preventiespray voor een zere keel?

Behandel- en preventiespray voor een zere keel is een medisch zelfzorghulpmiddel dat een zere keel behandelt en voorkomt. Eenmaal richting de keel gespoten biedt de formule een snel gevoel van verlichting van de symptomen van een zere keel, zoals pijn en een opgezwollen keel.

### Wat u moet weten voordat u behandel- en preventiespray voor een zere keel gebruikt

#### Gebruik de Behandel- en preventiespray voor een zere keel niet als:

- u overgevoelig bent voor een van de ingrediënten die verderop worden genoemd.

#### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Uitsluitend voor oraal gebruik.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.
- Raadpleeg uw arts als de symptomen van een zere keel niet verbeteren na 5 dagen behandeling, als ze verslechteren of gepaard gaan met koorts.

U dient de spray niet meer te gebruiken en uw arts te raadplegen als de volgende klachten optreden:

- Langdurige heesheid of stemproblemen.
- Als u nare effecten opmerkt na het gebruik van Behandel- en preventiespray voor droge hoest.

#### Behandel- en preventiespray voor een zere keel in combinatie met andere behandelingen

Behandel- en preventiespray voor een zere keel kan in combinatie met andere behandelingen tegen verkoudheid gebruikt worden.

#### Zuigelingen en kinderen

Behandel- en preventiespray voor een zere keel mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 3 jaar.

#### Behandel- en preventiespray voor een zere keel tijdens zwangerschap en borstvoeding

Raadpleeg uw huisarts voor het gebruik van Behandel- en preventiespray voor een zere keel tijdens zwangerschap of borstvoeding.

### Hoe werkt de behandel- en preventiespray voor een zere keel?

Behandel- en preventiespray voor een zere keel is gebaseerd op de werkzame medische stof Polysac-Active™. Wanneer de formule in de richting van de keel wordt gespoten met behulp van het mondstuk op de fles vormt Polysac-Active™ een beschermende laag aan de achterkant van de keel die zorgt voor een snel gevoel van verlichting van de klachten van een zere keel. De keel wordt ook beschermd tegen verdere irritatie.

### Hoe gebruikt u behandel- en preventiespray voor een zere keel?

| <b>Leeftijd</b>                                 | <b>Dosering</b>                              |
|---|--|
| Kinderen jonger dan 3 jaar                      | Niet aanbevolen                              |
| Kinderen vanaf 3 jaar (onder toezicht) en ouder | Spray elke 3 uur 2 tot 3 keer of zoals nodig |

### Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van behandel- en preventiespray voor een zere keel?

Er zijn geen bekende bijwerkingen.

### Wat zijn de ingrediënten van behandel- en preventiespray voor een zere keel?

Aqua, Polysac-Active™, Natriumchloride, Laureth-9, Kaliumsorbaat, Chondrus Crispus, Olie van Salvia Officinalis (salie), Olie van Mentha Piperita, Citroenzuur

### Hoe bewaart u behandel- en preventiespray voor een zere keel?

Bewaar de behandel- en preventiespray voor een zere keel in de originele verpakking op kamertemperatuur (15-25 °C).

Gebruik de Behandel- en preventiespray voor droge hoest niet na de uiterste houdbaarheidsdatum zoals die gedrukt staat op de fles en de buitenverpakking.

### Wat is de inhoud van de verpakking?

De verpakking bevat een fles van 25 ml E met spray zere keel en een gebruiksaanwijzing.

#### Registratiehouder:

Vemedia Manufacturing BV  
Verrijn Stuartweg 60  
1112 AX Diemen

#### Fabrikant:

Medical Brands Development BV  
Piet Heinkade 199  
1019 HC Amsterdam

#### Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen:

Imgroma B.V.  
Verrijn Stuartweg 60  
1112 AX Diemen  
Telefoon 0900-1011015

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in april 2015

25STS.IMG.NL.I.01

