



Pollinosan® Hooikoorts neusspray

Behandelt en voorkomt hooikoorts
en vergelijkbare allergische reacties

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik van A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray. Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg, het bevat belangrijke informatie. Wanneer u vragen heeft over dit product, stel deze dan aan uw arts of neem contact op met de fabrikant.

Wat is A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray en waarvoor gebruikt u het?

- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is een neusspray voor de behandeling en het voorkomen van hooikoorts.
- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is een medisch hulpmiddel en bevat een klinisch bewezen effectieve combinatie van Ectoin® en zeezout. Ectoin® is een 100% natuurlijk ingrediënt met celbeschermende en ontstekingsremmende eigenschappen.
- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is een licht hyper-tone oplossing. Het vermindert de schadelijke invloeden van allergenen in de lucht. Het ondersteunt het herstel van geïrriteerd neusslijmvlies veroorzaakt door allergenen.
- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray vermindert door allergenen veroorzaakte ontstekingen van het neusslijmvlies. Het verlicht allergische symptomen, zoals loopneus, jeukende neus en verstopte neus.
- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray bevat geen conserveringsmiddelen.

- A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is geschikt voor een gevoelige neus.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Dit middel niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor Ectoin® of een van de andere ingrediënten.
Dit middel niet gebruiken als zich een allergische reactie voordoet. U dient dan onmiddellijk te stoppen met het gebruik van A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray. Niet gebruiken als het product beschadigd is. 
Uit hygiënisch oogpunt mag elke verstuiver slechts door één persoon worden gebruikt.
Na opening is het product nog 3 maanden houdbaar. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Wat moet u weten voordat u A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray gebruikt?

Er zijn geen interacties bekend tussen A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray en andere neussprays.

Hoe gebruikt u A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray?

Gebruik A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray altijd volgens deze instructies voor gebruik. Naar behoefte *meerdere keren per dag 1-2x sprayen* per neusgat, tenzij anders is geadviseerd.



Kinderen jonger dan 2 jaar mogen niet meer dan 10 applicaties (van 2 verstuivingen per neusgat) per dag. Kinderen van 10 jaar en jonger en mensen die niet in staat zijn om deze spray zelfstandig te gebruiken, moeten door een volwassene geholpen worden bij de toediening van deze spray.
Indien nodig kan de neusspray gerust langer worden gebruikt. Zonder onderbreking tot maximaal 30 dagen. Geeft geen gewenningseffect.

Bij het eerste gebruik: verwijder het beschermdopje van het flesje en druk meerdere malen (2-3 keer pompen) op de spraykop totdat er nevel ontstaat. Knip de punt niet af. Als de verstuivingsfunctie is verminderd (wat kan gebeuren als de fles niet rechtop staat), druk meerdere keren op de spraykop en houdt het flesje daarbij rechtop.



1. Snuit zachtjes de neus.
2. Verwijder het beschermdopje van het flesje.
3. Houd het flesje vast met je wijsvinger en middelvinger aan weerszijden van de spraykop en je duim onder de spraykop. Buig je hoofd iets naar voren en sluit een neusgat door zachtjes met je vinger druk tegen de zijkant van je neus te zetten.
4. Begin voorzichtig door uw neus te ademen.
5. Breng de spraykop in het neusgat. Druk de pomp snel en stevig naar beneden en spray in uw neusgat. Blijf tegelijkertijd rustig door de neus ademen.
6. Breng de spraykop in uw andere neusgat.
7. Herhaal de hierboven beschreven stappen voor het andere neusgat.
8. Veeg de spraykop na ieder gebruik af.
9. Plaats het dopje er direct weer op.

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding

Als deze spray wordt toegepast volgens de gebruiksaanwijzing, is er geen bewijs voor een bepaald risico tijdens zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

Mogelijke bijwerkingen

Mits gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing wordt dit middel goed verdragen. Regelmatig voorkomende of aanhoudende bijwerkingen zijn tot nu toe niet bekend. Merk u wel bijwerkingen na gebruik van dit middel geef dit dan graag door aan uw arts of aan A.Vogel B.V. Neem contact op met uw arts of apotheker als de bijwerkingen aanhouden of verergeren.

Ingrediënten

Ectoin®, zeezout, water
Geen conserveringsmiddelen

1 spray bevat 0,14 ml oplossing

Bewaren

De vervaldatum van A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray staat vermeld op de verpakking en op de flacon. Niet gebruiken na de vervaldatum.

Bewaren tussen 2°C - 25°C.

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Verpakking

A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is verkrijgbaar in een verpakking van 20 ml.

Naast A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is er ook A.Vogel Pollinosan Hooikoorts oogdruppels verkrijgbaar. Medisch hulpmiddel: lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Persoonlijk advies

Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies? Kijk dan op www.avogel.nl of bel met de A.Vogel gezondheidslijn 0900 - 246 46 46 of stuur een e-mail naar info@avogel.nl.

Tips

- Ga wandelen of sporten na een regenbui of 's ochtends vroeg, dan is de concentratie stuifmeel in de lucht het laagst.
- Probeer stuifmeelrijke gebieden te vermijden. Strand en bergstreken zijn te verkiezen boven weide- en bosgebieden.
- Zorg voor een goede hygiëne en ventilatie in uw woning. Plaats horren voor ramen en deuren om het binnendringen van pollen tegen te gaan.
- Houd de luchtvochtigheid in huis tussen de 40 en 60 procent.
- Draag een zonnebril om de ogen tegen stuifmeel te beschermen.
- Wrijf zo min mogelijk in de ogen en aan de neus.


Zorg voor het milieu

A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijk geproduceerde verpakkingsmaterialen. Deze materialen hebben bij verbranding geen schadelijke effecten op het milieu of zijn geschikt voor recycling.



A.Vogel Pollinosan Hooikoorts neusspray is een medisch hulpmiddel.

Inhoud 20 ml

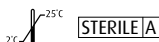

Fabrikant: **C E 0197**
bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Germany

Distributeur:

A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16,
8081 HC Elburg, Nederland
0900- 246 46 46

De tekst op deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd in oktober 2020.



Te gebruiken tot (vervaldatum)



CE-symbool met notifiedbodynummer



Gebruiksaanwijzing lezen



Lotnummer



Aandacht: Gebruiksaanwijzing lezen
(met betrekking tot waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen)



Temperatuurgrenzen



Fabrikant



Niet gebruiken als het product beschadigd of
doorboord is



Het product is steriel door aseptische filtratie

