



# Similasan

Liposoom  
spray

V1.0 B5NL2553 / 00891109

## Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen

**NL**

### Instructies voor gebruik

*Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen* voor de behandeling en verzachting van de irritaties van gespannen ogen na intensief kijken.

### Ingrediënten

Sojalecithine, natriumchloride, ethanol, fenoxylethanol, vitamine A - palmitaat, vitamine E, aqua purificata.

### Toepassingsgebieden

*Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen* stabiliseert de lipide laag van de traan film, reguleert en verbetert zo de bevochtiging van het oogoppervlak en de oogleden. Het kan worden gebruikt bij aandoeningen zoals gespannen ogen en oogleden en een branderig of jeukende sensatie in de ogen als gevolg van intensief kijken en overmatig beeldschermgebruik.

### Contra indicaties

*Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen* mag niet worden gebruikt in geval van overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

### Aanwijzingen voor gebruik

Spray *Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen* 1 - 2 keer op gesloten oogleden.

Niet spuiten in het open oog. Houd een afstand van ca. 10 cm aan. Indien je oog make-up gebruikt, *Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen* moet worden gebruikt voordat de make-up wordt aangebracht en nadat de oogmake-up is verwijderd.

*Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen* kan ook gebruikt worden nadat de make-up is aangebracht.

In dit geval is één spray voldoende en kan deze het beste worden aangebracht vanaf een wat grotere afstand (zo'n 20 cm).

*Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen* maakt het dragen van contactlenzen prettiger en comfortabeler.

Algemene aanbeveling:

Gebruik *Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen* 3 tot 4 keer per dag.

Voor meer ernstige gevallen, *Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen* kan ook vaker worden gebruikt.

### Opmerkingen

De spray kan zonder problemen worden gebruikt door verschillende personen. *Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen* mag niet gelijktijdig worden gebruikt met andere ooggerelateerde medicijnen. Als uw arts u andere adviezen geeft dan dan het gebruik van *Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen*, overweegt u dan een interval van 10 minuten tussen de het gebruik van de verschillende middelen. Het is belangrijk om te controleren of de afdichting van de spray pomp past, correct en onbeschadigd is voor gebruik. De fles is royaal gevuld, door de technische werking van de spray kan deze niet volledig worden geleegd. Het is gegarandeerd dat de vermelde hoeveelheid worden gebruikt.

### Houdbaarheid en opslag

Bewaar op een koele, droge plaats.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Dit product kan gebruikt worden TOT 6 MAANDEN na het eerste gebruik.

Niet gebruiken na de vervaldatum.

Bij gebruik voor de eerste keer, 3 of 4 keer pompen om de bus te vullen.

Datum van de laatste herziening: 2015-10



- 1 Kijk voor het gebruik van de spray goed of de opening zich richting het oog en op de juiste afstand van het oog bevindt.
- 2 Sluit de ogen en ontspan (niet knijpen).
- 3 Spray *Similasan Computer Ogen 2in1 Spray voor gespannen ogen* op het ooglid.
- 4 Open de ogen. Knipper enkele malen met de oogleden.
- 5 Na enkele ogenblikken wordt het effect merkbaar.



### Fabrikant

Optima Medical Swiss AG  
Bundesstrasse 7  
CH-6300 Zug

### Distributie

Similasan Nederland BV  
Postbus 31150  
6503 CD Nijmegen  
www.similasan.nl

### Symbol:



Fabrikant  
Vervaldatum  
(JJJJ-MM: Jaar-Maand)

CE 0482

**LOT** LOT-Nummer

Bewaartemperatuur 2°C - 25°C

Lees de gebruiksaanwijzing!