

Multi-Gyn LiquiGel - behandelt vaginale droogheid en stimuleert de natuurlijke bevochtiging.

- Werkt direct bevochtigend
- Stimuleert de natuurlijke bevochtiging
- Voorkomt irritatie en conditioneerst het vaginale weefsel
- Is natuurlijk, veilig en beschermt de vaginale flora

Hoe werkt Multi-Gyn LiquiGel?

Multi-Gyn LiquiGel werkt direct bevochtigend. Het optimaliseert de conditie van het vaginale weefsel en stimuleert de eigen natuurlijke vochtigheid van de vagina. Multi-Gyn LiquiGel is gebaseerd op het gepatenteerde 2QR-complex. Dit is een natuurlijke stof die wordt gewonnen uit planten en bestaat uit bioactieve polysacchariden. Het heeft als unieke eigenschap dat het schadelijke bacteriën op een effectieve en natuurlijke wijze neutraliseert. Hierdoor wordt het natuurlijke herstel van beschadigd weefsel in de schaamstreek ondersteund.

Multi-Gyn LiquiGel bevordert de vaginale vochtigheid en biedt bescherming tegen vaginale droogheid en irritatie. Door het lichaamseigen bevochtigingsproces te stimuleren, wordt een optimale, natuurlijke balans in de vaginale flora bereikt. Bevochtiging van het vaginale weefsel zorgt voor herstel van de natuurlijke elasticiteit en functies. Multi-Gyn LiquiGel vormt een bioadhesie laag over het slijmvlies; dit zorgt voor langdurige bevochtiging en behoud van een gezonde vaginale flora. Het regelmatig in- of aanbrengen van Multi-Gyn LiquiGel vermindert irritatie en ondersteunt de optimale conditie van de vagina.

Multi-Gyn LiquiGel is geen hormoonbehandeling, maar is dankzij zijn unieke werking geklassificeerd als een medisch hulpmiddel klasse IIa.

Indicaties

- vaginale droogheid tijdens en na de menopauze
- vaginale droogheid als gevolg van hormonale veranderingen, medicijnen en stress
- vaginale droogheid tijdens geslachtsgemeenschap
- vaginale atrofie, irritatie en/of ongemak

Wijze van gebruik

- **In geval van vaginale droogheid** Multi-Gyn LiquiGel ten minste één keer per dag of zo vaak als nodig in ruime hoeveelheid in- of aanbrengen.

• **Ter voorkoming van vaginale droogheid of irritatie als gevolg van vaginale droogheid** Multi-Gyn LiquiGel twee keer per dag in ruime hoeveelheid in- of aanbrengen gedurende een periode van minimaal 5 dagen.

• **Ter bevordering van de natuurlijke vochtigheid van de vagina** Multi-Gyn LiquiGel dagelijks inbrengen voor het slapen.

Let op!

Multi-Gyn LiquiGel is een actief product dat de vagina bevochtigt en de natuurlijke vochtigheid van het weefsel conditioneerst en stimuleert. Als actief product kan Multi-Gyn LiquiGel na het aanbrengen een tintelend gevoel geven. Dit is volkomen normaal en het gevoel verdwijnt na enkele minuten.

Multi-Gyn LiquiGel mag niet langer dan 30 opeenvolgende dagen worden gebruikt, zodat de vaginale flora zichzelf kan regelen zonder ondersteuning. In geval van aanhoudende of terugkerende klachten dient u te allen tijde contact op te nemen met uw arts.

Samenstelling

Multi-Gyn LiquiGel bevat ruim 25% van het 2QR-complex. Andere bestanddelen zijn plantaardige Glycerine, het natuurlijke verdikkingsmiddel Xanthan Gum en de natuurlijke osmose regulator Betaine. Multi-Gyn LiquiGel is natuurlijk, veilig en zacht. Het bevat geen conserveermiddelen, hormonen, siliconen, bestanddelen van dierlijke afkomst, chemische stoffen, toxische stoffen of geurstoffen en is volkomen onschadelijk. Het is niet vet, laat geen vlekken achter en is in water oplosbaar. Het tast tampons en condooms niet aan.

Actieve ingrediënten: Galactoorabinan Polyglucuronide Acid Crosspolymer*, Glycerine, Betaine, Xanthan Gum

*2QR-complex: gepatenteerde bioactieve polysacchariden. www.2QR.com

Allergische reacties op de bestanddelen van Multi-Gyn LiquiGel komen slechts zeer zelden voor. Als u twijfelt, brengt u een kleine hoeveelheid gel aan op de binnenkant van uw onderarm. Als een jeukende rode plek ontstaat, wordt het gebruik van Multi-Gyn LiquiGel afgeraden.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend van Multi-Gyn LiquiGel. Het heeft een veilige en natuurlijke samenstelling. Multi-Gyn LiquiGel kan niet als anticonceptie worden gebruikt en bevat geen spermicide. Er is echter geen onderzoek gedaan naar de invloed op de activiteit van spermacellen.

Interactie met medicijnen

Multi-Gyn LiquiGel kan probleemloos naast medicijnen worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het gebruik van Multi-Gyn LiquiGel tijdens zwangerschap en in de periode van borstvoeding.


Bewaren

Geadviseerd wordt om Multi-Gyn LiquiGel te bewaren bij kamertemperatuur (tussen 10 °C en 25 °C).


Toepassing

• Uitwendige toepassing


In geval van droogheid van de uitwendige schaamstreek (de vulva) kunt u Multi-Gyn LiquiGel met uw vinger aanbrengen (was altijd uw handen voor en na het aanbrengen van de gel).

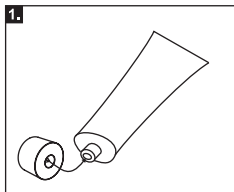


1. Draai de dop van de tube. Voordat u de gel voor het eerst kunt gebruiken, moet u met de achterzijde van de dop de verzegelde opening van de tube doorprikken.

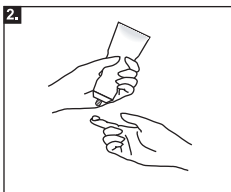

2. Neem de tube in één hand en houd de wijsvinger van uw andere hand dichtbij de tube, zoals de afbeelding laat zien. Knijp zachtjes in de tube. Blijf knijpen tot u een ruime hoeveelheid op uw wijsvinger heeft, zoals de afbeelding laat zien.

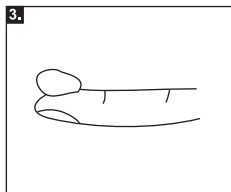


3. De hoeveelheid gel op uw wijsvinger is vergelijkbaar met de grootte van uw vingertop (2 ml).

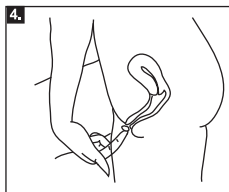


4. Breng de gel aan op de uitwendige schaamstreek.

• **Inwendige toepassing**


U kunt voor inwendige toepassing de speciale inbrengcanule gebruiken. Deze is bijgesloten in het doosje en kan op de tube worden geschroefd. Na gebruik kunt u de inbrengcanule op de tube laten, afspoelen onder de warme kraan en afsluiten met de dop. U kunt de gel ook met uw vinger inbrengen.

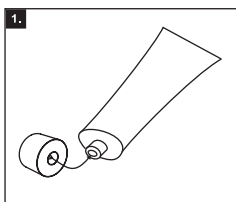


1. Draai de dop van de tube. Voordat u de gel voor het eerst kunt gebruiken, moet u met de achterzijde van de dop de verzegelde opening van de tube doorprikken.

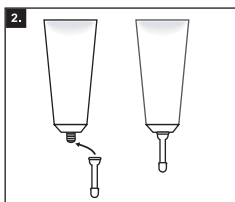


2. Draai de speciale inbrengcanule, die zich in het doosje bevindt, op de tube.

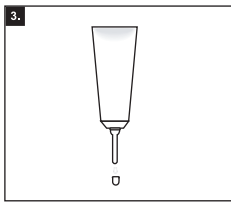


3. Haal het schroefdoopje van de inbrengcanule.

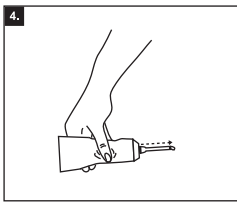


4. Neem de tube in één hand en knijp zachtjes in de tube tot de gel uit de voorkant van de inbrengcanule komt. Als de gel eruit komt, weet u dat de inbrengcanule gevuld is met gel en klaar is voor gebruik. Kijk hoeveel gel eruit komt als u de tube zachtjes inknijpt; u heeft minimaal de hoeveelheid ter grootte van uw vingertop nodig (2 ml).

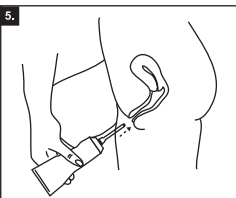


5. Bregel de inbrengcanule in de vagina zoals de afbeelding laat zien. De vagina is 7 à 8 cm lang en dit komt ongeveer overeen met de lengte van de wijsvinger van een vrouw. De lengte van de inbrengcanule is ongeveer gelijk en kan de baarmoedermond dan ook niet beschadigen.

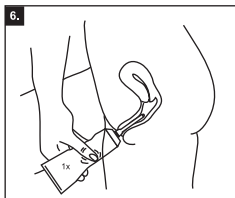

6. Knijp zachtjes in de tube. U heeft minimaal de hoeveelheid ter grootte van uw vingertop nodig. Er is geen beperking in gebruik en het is zodoende geen bezwaar als u meer inbrengt in de vagina.

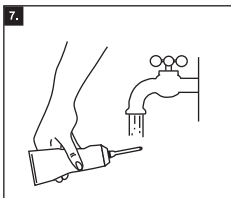

7. Na gebruik kunt u de inbrengcanule op de tube laten zitten en afspoelen onder de warme kraan.

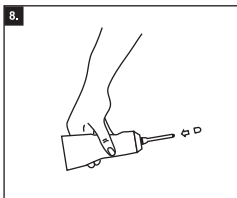

8. Draai het schroefdoopje op de inbrengcanule.

Achtergrondinformatie

Vaginale droogheid en ongemak komen vaak voor

Vaginale droogheid en het ongemak daarvan is een probleem dat bij meer dan de helft van vrouwen van alle leeftijden voorkomt.

Met name vrouwen in (en ook na) de menopauze ervaren deze problemen als gevolg van een natuurlijke verandering in de hormoonhuishouding. Gewoonlijk blijven de wanden van de vagina bevochtigd met een dunne laag heldere vloeistof. Tijdens de menopauze neemt het beschikbare vocht af als gevolg van de daling van de oestrogeenwaarden. Ook wordt de vagina hierdoor dunner en minder elastisch.

Vaginale droogheid is daarnaast het tweede meest voorkomende ongemak bij alle seksueel actieve vrouwen. Veel vrouwen merken hun vaginale droogheid pas wanneer het vrijen onaangenaam of zelfs pijnlijk wordt. Dit kan hun zelfvertrouwen en stemming negatief beïnvloeden en het geeft in het algemeen een onbehaaglijk gevoel.

De oorzaken van vaginale droogheid

De meest voorkomende oorzaak is een verminderde aanmaak van vaginaal vocht als gevolg van hormonale veranderingen, zoals in de tweede helft van de menstruele cyclus of vanwege de menopauze. Er zijn echter ook veel andere factoren die het probleem kunnen veroorzaken of verergeren, zoals het gebruik van hormonale anticonceptie of sommige medicijnen, maar ook zeep, tampons, stress, vermoeidheid, zwangerschap en geboorte, en geslachtsgemeenschap met onvoldoende natuurlijke vochtigheid.